

# sanabelle Bettbeutel U110

Artikelnummer 77712800

Schlauchlänge 120 cm

## Merkmale:

- Geschlossenes Urindrainagesystem
- 2000 ml Volumen
- 120 cm Schlauchlänge
- Belüftete Tropfkammer
- Belüftungsfilter
- Rücklaufsperr
- Ablassventil
- Nadelfreie Entnahmestelle für Frischurin
- Steril

## Einsatzgebiete / Indikationen:

- Dauerurinaleitung in Verbindung mit transurethralen oder suprapubischen Blasenkathetern, Urinalkondomen sowie sonstigen internen und externen Urinaleitern.

## Anschluss und Wechsel:

- Nach der Anlage eines Katheters oder eines Urinalkondoms wird der Bettbeutel unter sterilen Bedingungen angeschlossen.
- Der Wechsel des Bettbeutels findet bei Funktionsstörungen oder nach maximal 14 Tagen statt.
- Vor dem Wechsel die Verbindungsstelle zwischen Beutel und Urinaleiter mit einer geeigneten Desinfektionslösung desinfizieren; Einwirkzeit der Lösung beachten.
- Den neuen Beutel unter sterilen Bedingungen konnektieren.
- Der vollständig entleerte Beutel kann grundsätzlich im Hausmüll entsorgt werden.

## Befestigungsmöglichkeiten:






- Die Aufhängung muss unterhalb des Blasenniveaus mit senkrechter Tropfkammer erfolgen; Bodenkontakt zu vermeiden. Zur Aufhängung verfügt der Beutel über eine integrierte Aufhängevorrichtung und über eine Kordel für eine zusätzliche Fixierung.
- Abknicken und Durchhängen des Schlauchsystems sind zu vermeiden, da sie zu Abflussstörungen führen können. Dazu Bettlakenklemme anwenden.

## Entleerung:

- Der Bettbeutel muss rechtzeitig entleert werden, bevor der Urin die Rücklaufsperr erreicht.
- Zum Entleeren das Schiebeventil öffnen. Den Urin in ein bereitgestelltes Auffanggefäß fließen lassen.
- Ablassventil schließen.

## Sonstige Hinweise:

- Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.
- Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt oder bereits geöffnet ist.
- Frischurin-Proben können an der nadelfreien Punktierstelle entnommen werden.
- Bei einer Probeentnahme über eine herkömmliche Spritze am Schlauchkonnektor vorher den Schlauch mit der Schiebeklemme abklemmen.
- Produkt nur zum Einmalgebrauch. Nach Gebrauch entsorgen. Produkt darf nicht wiederverwendet und nicht resterilisiert werden. Wiederverwendung birgt das Risiko einer Infektion von Patient und/oder Anwender und kann die Leistung des Produktes bis hin zum Funktionsausfall beeinträchtigen.

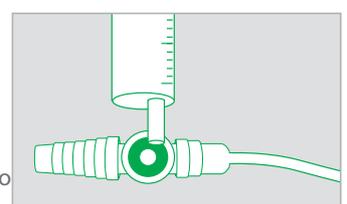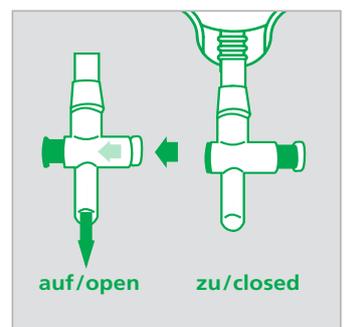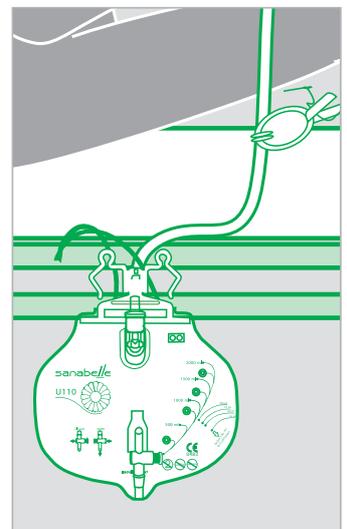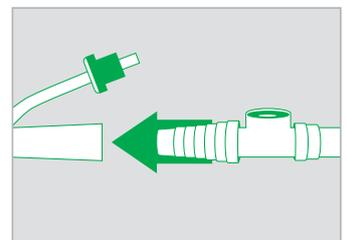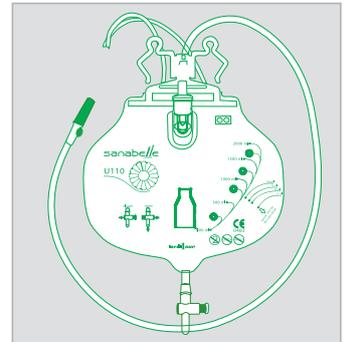

CE  
0483