

sanabelle Bettbeutel U150

Artikelnummer 77712802

Schlauchlänge 110 cm

Merkmale:

- 1500 ml Volumen
- 110 cm Schlauchlänge
- Rücklaufsperr
- Aufreissnaht
- Unsteril

Einsatzgebiete / Indikationen:

- Urinableitung in Verbindung mit externen Urinableitern.

Anschluss und Wechsel:




- Nach der Anlage des externen Urinableiters wird der Bettbeutel angeschlossen.
- Der Wechsel des Bettbeutels findet vor Erreichen des Urins an der Rücklaufsperr oder spätestens nach 24 Stunden statt.
- Zum Entleeren des Beutels die Aufreißnaht öffnen, nachdem der externe Urinableiter diskonnektiert wurde.
- Der vollständig entleerte Beutel kann grundsätzlich im Hausmüll entsorgt werden.

Befestigungsmöglichkeiten:

- Die Aufhängung muss unterhalb des Blasenniveaus erfolgen; Bodenkontakt ist zu vermeiden. Zur Aufhängung verfügt der Beutel über Ösen am oberen Beutelrand.
- Abknicken und Durchhängen des Schlauchsystems sind zu vermeiden, da sie zu Abflussstörungen führen können.

Sonstige Hinweise:

- Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.
- Produkt nur zum Einmalgebrauch. Nach Gebrauch entsorgen, Produkt darf nicht wiederverwendet werden. Wiederverwendung birgt das Risiko einer Infektion von Patient und/oder Anwender und kann die Leistung des Produktes bis hin zum Funktionsausfall beeinträchtigen.

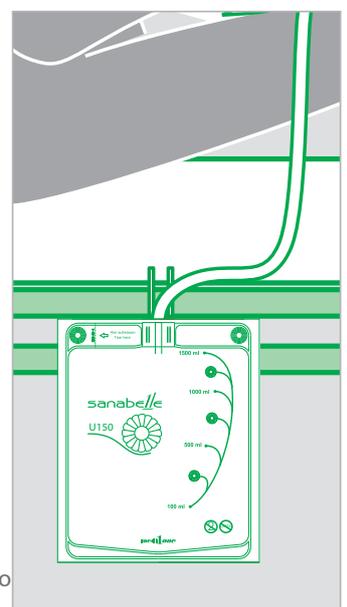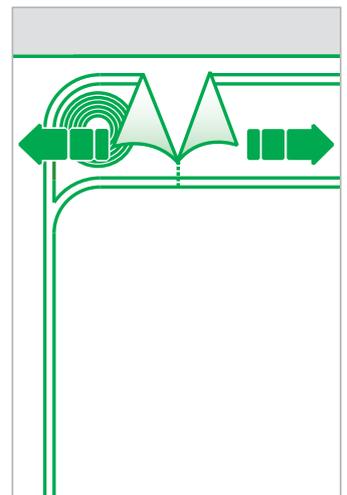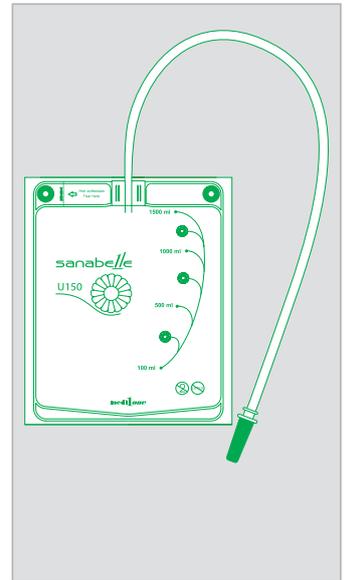

CE